

8. Пробирку с мочой, идентификационный лист и карту с уникальным кодом\* поместите в транспортировочный пакет типа зиплок.

9. Закройте транспортировочный пакет, принесите его в Лабквест/ Q-клиники или передайте курьеру.

**\*ВНИМАНИЕ!** Обязательно вложите карту с уникальным кодом! Без данного номера активация вашего исследования невозможна!

## Способы получения результата



Результат будет отправлен на указанную Вами при оформлении заявки электронную почту.



Также результат будет доступен в личном кабинете на сайте [www.labquest.ru](http://www.labquest.ru)

# ИНСТРУКЦИЯ

## по самостоятельному взятию биоматериала для выполнения исследования


### СОСТАВ НАБОРА:

- Карта с уникальным кодом - 1 шт.
- Идентификационный лист - 1 шт.
- Стерильный контейнер для мочи - 1 шт.
- Пробирка с поршнем и наконечником для мочи **Urine-Monovette®** - 1 шт.
- Пакет типа зиплок (используйте для упаковки биоматериала) - 1 шт.

## ПОДГОТОВКА И СБОР МОЧИ ДЛЯ ПЦР-ИССЛЕДОВАНИЯ

- Сбор мочи желательно проводить утром или спустя не менее 3 часов после последнего мочеиспускания.
1. Провести тщательный туалет наружных половых органов.
  2. Для исследования отобрать первую порцию мочи в объеме 15-30 мл в специальный одноразовый контейнер для сбора мочи.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

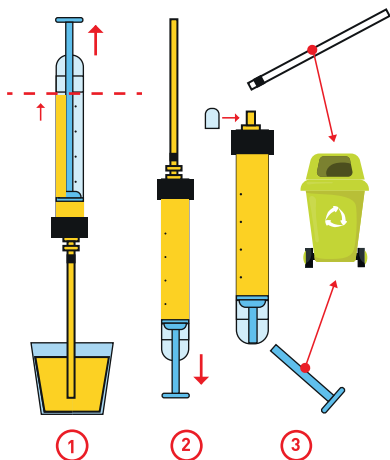

## Подготовка образца мочи для транспортировки

3. Снимите заглушку с носика пробирки и не выбрасывайте. Она Вам потребуется после заполнения пробирки.
4. Наденьте плотно наконечник для переноса мочи на носик специальной пробирки Urine-Monovette®. Опустите в первичный контейнер наконечник для переноса мочи и плавно оттяните поршень

пробирки Urine-Monovette® до упора вверх так, чтобы пробирка заполнилась мочой до метки (1).

5. После заполнения выньте наконечник с пробиркой Urine-Monovette® из первичного контейнера с мочой.

Переверните пробирку Urine-Monovette® в вертикальное положение наконечником вверх и оттяните рукоятку поршня вниз, пока она не закрепится в основании пробирки так, чтобы аспирационный наконечник освободился от мочи (2).

6. Снимите наконечник и утилизируйте. Отломите рукоятку поршня и утилизируйте.

Носик пробирки Urine-Monovette® плотно закройте заглушкой (3). Первичный контейнер с мочой плотно закройте и утилизируйте.

## Маркировка и упаковка биоматериала

7. Заполните все графы идентификационного листа данными пациента, у которого был взят биоматериал.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА