

# ИНСТРУКЦИЯ

## «Q-test набор для самостоятельного взятия гинекологических мазков» рекомендован женщинам:

- Без жалоб, для скрининга на вирус папилломы человека
- С вагинальными и/или цервикальными выделениями
- С воспалительными заболеваниями органов малого таза
- После завершения курса лечения системными антибиотиками широкого спектра действия;
- Проходившим лечение заболеваний влагалища и шейки матки (для контроля лечения);
- Которым планируется проведение инвазивных манипуляций на органах малого таза;
- Планирующим беременность и при подготовке к ЭКО
- Без постоянного полового партнера;
- После смены полового партнера;
- После незащищенного полового контакта с новым/непостоянным партнером;
- Имевшим половой контакт с партнером, у которого установлена одна из ИППП;
- С диагнозом «женское бесплодие» (МКБ-10, N97).

## Условия подготовки перед самостоятельным взятием биоматериала

Перед использованием необходимо проверить целостность набора.

Устройство «Квинтип» (Qvintip) предназначено только для одноразового использования.

Для исследования требуется проба вагинального отделяемого.

Необходимо осторожно обращаться с палочкой для самостоятельного взятия проб и использовать ее только в соответствии с инструкцией.

После прохождения УЗИ малого таза должно пройти не менее 48 часов.

Нельзя производить взятие пробы во время менструации.

Белую часть палочки нельзя сгибать или отламывать до самостоятельного взятия пробы.

За 5 дней исключить применение вагинальных свечей, кремов, гелей.

За сутки необходимо исключить половые контакты.

Тестирование может проводиться во время первого триместра беременности.

## Способ применения

Вы можете проводить тестирование в положении стоя или лежа

- 1 Достаньте палочку для самостоятельного забора проб из упаковки, держа ее за синюю ручку.
- 2 Держите палочку во время забора пробы прямо; Введите палочку во влагалище до упора (примерно на 10 см):
  - пять раз поверните палочку для самостоятельного забора проб вокруг своей оси;
  - извлеките палочку (удерживая ее прямо).
- 3 Дайте палочке высохнуть не менее 1 минуты, положив ее на пробирку так, чтобы белая часть палочки оставалась в воздухе. Убедитесь, что белая часть ни к чему не прикасается.
- 4 Опустите белую часть палочки в пробирку. Согните палочку так, чтобы белая часть отломилась и упала в пробирку.
- 5 Закройте пробирку крышкой и утилизируйте синюю часть палочки.
- 6 Доставьте в медицинские офис ЛабКвест.

После самостоятельного взятия образца биологического материала - пробирку плотно закрыть и хранить сухом месте, избегая попадания прямых солнечных лучей, при температуре от + 4°C до 30°C

для получения достоверных результатов проба должна быть доставлена в течение 24 часов после самостоятельного взятия биологического материала

